

Չարգելի բուժառու,

Ձեզ վերջերս իմպլանտացվել է HumanOptics-ի արտադրության **ARTIFICIAL/IRIS** իմպլանտ (կոչվում է նաև ծիածանաթաղանթի իմպլանտ): Բուժառուների այս տեղեկատվական թերթիկը նախատեսված է տրամադրելու ամենահաճախ տրվող հարցերի պատասխանները **ARTIFICIAL/IRIS**-ի վերաբերյալ: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք խորհրդակցել Ձեր ակնաբույժի հետ:

ԻՆՉԻՐ ԶԱՄԱՐ Է ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՒՄ ԱՐՅԵՍՏԱԿԱՆ ԾԻԱԾԱՆԱԹԱՂԱՆԹ:

ARTIFICIAL/IRIS-ը բժշկական իմպլանտ է, որն օգտագործվում է անիրիդիայի բուժման համար: Անիրիդիան բնութագրվում է որպես աչքի բնական ծիածանաթաղանթի մասնակի կամ լրիվ բացակայություն:

Արհեստական ծիածանաթաղանթը վերականգնում է աչքի բնական բացվածքի ֆունկցիան, սակայն բքի չափը միշտ մնում է նույնը՝ զգալիորեն բարելավելով ինչպես տեսողության որակը, այնպես էլ ծիածանաթաղանթի էսթետիկ տեսքը:

ՈՐ ԲՈՒԺԱՌՈՒՆԵՐԻ ԶԱՄԱՐ Է ԶԱՐՄԱՐ ԱՐՅԵՍՏԱԿԱՆ ԾԻԱԾԱՆԱԹԱՂԱՆԹ:

Արհեստական ծիածանաթաղանթը կարող է օգտագործվել մեծահասակների և 6 տարեկանից մեծ երեխաների համար, ում բնական ծիածանաթաղանթը ամբողջովին կամ մասնակիորեն բացակայում է: Անիրիդիան կարող է լինել բնածին կամ առաջանալ դժբախտ պատահարի կամ հիվանդության պատճառով: Սարքի տեղադրման հետ կապված կլինիկական տվյալներ չկան կրծքով կերակրող մայրերի և թուլացած իմունիտետով անձանց համար:

ԿՎՆ ԱՐԴՅՈՔ ԻՄՊԼԱՆՏՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱԿՈՐԿԱԾ ԱՆԲԱՐԵՆՊԱՍՏ ԵՐԱՌՅԹՆԵՐ:

Ոչ մի բժշկական միջամտություն ամբողջովին ռիսկերից զուրկ չէ, այդ թվում նաև՝ անիրիդիայի բուժման և **ARTIFICIAL/IRIS**-ի իմպլանտացման հետ կապված: Այնուամենայնիվ, հենց իմպլանտի պատճառած որևէ անբարենպաստ երևույթ հայտնի չէ:

ԻՆՉՊԵՍ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԻՄԱՆԱԿ, ԹԵ ՈՐ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆ Է ՁԵՉ ԻՄՊԼԱՆՏԱՑՎԵԼ:

Վիրահատությունից հետո Ձեզ տրամադրվել է բուժառուի քարտ, որտեղ նշված են արտադրողի կոնտակտային տվյալները: Բացի օգտագործված իմպլանտի մասին տեղեկություններից՝ բուժառուի քարտում նշված են նաև Ձեր անունը, վիրահատության օրը, վիրահատությունն իրականացնող ակնաբույժի և ակնաբուժական կենտրոնի կոնտակտային տվյալները: Ձեր իմպլանտը նույնականացվում է իր եզակի սերիական համարով (SN):

ԻՆՉ ՆՅՈՒԹԻՑ Է ՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԱՐՅԵՍՏԱԿԱՆ ԾԻԱԾԱՆԱԹԱՂԱՆԹ:

HumanOptics-ի արհեստական ծիածանաթաղանթը պատրաստված է կենսահամատեղելի սիլիկոնից (դիֆենիլ կո-դիմեթիլ պոլիսիլոքսանից և սիլիկոնային ամրացնող խեժից)՝ սիլիկոնի մեջ ներկառուցված գունային պիգմենտով: Արհեստական ծիածանաթաղանթի երկու մոդել կա (մանրաթելով/առանց մանրաթելի): «with Fiber» մոդելն ունի ներկառուցված պոլիմերային մանրաթելային ցանց, որը պատրաստված է պոլիէթիլենտերեֆտալատից (PET), ինչը մեծացնում է ամրությունը: «with Fiber» մոդելը օգտագործվում է հատուկ դեպքերում, երբ կարելի է ֆիքսացիա է ցուցված:

ԻՆՉ ՊԵՏՔ Է ԱՆԵՄ ԿԻՐԱՅԱՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԶԵՏՈ:

Բուժման լավագույն արդյունք ստանալու համար կարևոր է հետևել Ձեր ակնաբույժի ցուցումներին և հաճախել հետզնման այցելություններին, ինչպես որ համաձայնեցրել եք Ձեր ակնաբույժի հետ:

Եթե այլ կերպ ցուցված չէ Ձեր ակնաբույժի կողմից, վիրահատությունից հետո առաջին երկու շաբաթվա ընթացքում պետք է խուսափեք վիրահատված աչքի հետ որևէ մանիպուլյացիա կատարելուց, օրինակ՝ սեղմելուց կամ տրորելուց: Ձեր աչքը չպետք է շփվի ջրի կամ օճառի հետ ցնցուղ ընդունելիս կամ լվացվելիս: Սկզբնական շրջանում պետք է նաև զերծ մնաք ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունից, լողալուց, սուզվելուց, հեծանվավազքից կամ սաունա այցելելուց: Հարկավոր է նաև խուսափել այնպիսի գործողություններից, երբ մեծ քանակությամբ փոշի և կեղտ կա:

ՈՐՔԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԿԱՐՈՂ Է ԻՄՊԼԱՆՏԸ ՄԱՍ ԻՄ ՄԱՐՄՆՈՒՄ:

Եթե բժշկական հակացուցումներ չլինեն, արհեստական ծիածանաթաղանթը սովորաբար մնում է Ձեր աչքի մեջ Ձեր կյանքի մնացած ողջ ընթացքում: HumanOptics-ի արհեստական ծիածանաթաղանթի ծառայության հաստատված ժամկետը քսան տարի է: Խորհուրդ եկք տալիս անցնել պարբերական ակնաբուժական զննումներ՝ խորհրդակցելով բուժող բժշկի հետ:

ԱՐԴՅՈՔ ԻՄ ԱՐՅԵՍԱԿԱՆ ԾԻԱԾԱՆԱԹԱՂԱՆԹՈՎ ՄՈՏ ԶԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼԸ ԱՆԿՏԱՆԳ Է (ՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻ Է):

Ձեր իմպլանտի հետ կապված Մազնիսական ռեզոնանսային տոմոգրաֆիայի (ՄՈՏ) անվտանգության (համատեղելիության) մասին տեղեկությունները կարող եք գտնել Ձեր բուժառուի քարտի վրա: Այնտեղ տրամադրված են կարևոր տեղեկություններ իմպլանտի մասին՝ ՄՈՏ հետազոտության ժամանակ մազնիսական ճառագայթման վերաբերյալ, քանի որ արհեստական ծիածանաթաղանթը իմպլանտացնելուց հետո այն մշտապես մնում է Ձեր մարմնի մեջ:

HumanOptics-ի կողմից արտադրված արհեստական ծիածանաթաղանթի բոլոր իմպլանտները հավաստագրված են որպես ՄՈՏ հետազոտությունների հետ պայմանականորեն համատեղելի: Իմպլանտը ՄՈՏ հետազոտությունների համար հավաստագրված է որպես անվտանգ՝ որոշակի պայմաններում: Սա նշանակում է, որ արհեստական ծիածանաթաղանթի իմպլանտով բուժառուին միայն որոշակի պայմաններում պետք է մտնի ՄՈՏ սկանների մազնիսական դաշտ: Խնդրում ենք ՄՈՏ հետազոտությունից առաջ ցույց տալ Ձեր բուժառուի քարտը Ձեր բժշկին:

Լրացուցիչ մանրամասների համար խնդրում ենք այցելել www.humanoptics.com/mri:

ԻՆՉ ԿՈՂՄԱԿԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ/ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱՌԱՋԱՆԱԸ, ՈՐՈՆԸ ԿԱՊԿԱԾ ԵՆ ԱՐՅԵՍԱԿԱՆ ԾԻԱԾԱՆԱԹԱՂԱՆԹԻ ԻՄՊԼԱՆՏԱՑՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՄ ԻՆՉԸ ԿԱՐՈՂ Է ՎԿԱՅԵԼ ԻՄՊԼԱՆՏԻ ԹԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ:

Ծիածանաթաղանթի վիրահատությունից հետո կարող են առաջանալ հետևյալ կողմնակի ազդեցությունները, որոնք սովորաբար անցնում են կարճ ժամանակից.

- Օտար մարմնի զգացողություն, որն առաջացել է **ARTIFICIAL/IRIS**-ի տեղադրման համար արված կտրվածքից
- Աչքերի թթվաճախի կարմրություն

Արհեստական ծիածանաթաղանթի իմպլանտացման հետ կապված բարդությունների մասին կարող են հուշել հետևյալ ախտանիշները: Այս ախտանիշներն ունենալու դեպքում խորհրդակցեք բժշկի հետ.

- Տեսողության հանկարծակի կամ աստիճանաբար վատթարացում/մշուշոտ տեսողություն, լույսի բռնկումներ կամ մուգ վազող կետեր (լողացող մթազևումներ)
- Լույսի հանդեպ ավելացած զգայունություն
- Աչքի չափազանց արցունքահոսություն
- Աչքի ուժեղ կարմրություն և/կամ քոր
- Ցավ աչքում
- Սրտխառնոց, փսխում, ուժեղ գլխացավ

Այս ախտանիշները կարող են շատ հազվադեպ լինել՝ նույնիսկ բոլոր նախազգուշական միջոցները ձեռնարկելուց հետո: Եթե Ձեզ մոտ նկատվում է վերը նշված ախտանիշներից որևէ մեկը կամ ունենում եք անսպասելի խնդիր՝ ապաքինման գործընթացի հետ կապված, խնդրում ենք դիմել ձեր ակնաբույժին: Եթե լուրջ անբարենպաստ երևույթներ են առաջանում, բժիշկը պետք է դրա մասին տեղեկացնի արտադրողին և համապատասխան առողջապահության մարմին: Ձեր երկրի համապատասխան առողջապահական մարմինը կարող եք գտնել www.humanoptics.com/patient-information կայքի «Առողջապահական մարմիններ» բաժնում: